

MediGel®

Wund- reinigungsspray



GEBRAUCHSANWEISUNG - bitte aufmerksam lesen!

MediGel® Wundreinigungsspray

Zweckbestimmung

MediGel® Wundreinigungsspray ist eine alkohol-freie Lösung zur Reinigung und Befeuchtung von Wunden. MediGel® Wundreinigungsspray kann auch beim Verbandwechsel zum Lösen anhaftender Verbandstoffe oder Verkrustungen verwendet werden.

Eigenschaften

MediGel® Wundreinigungsspray ist eine farblose, geruchlose Lösung zur physikalischen Wundreinigung. Wunden sind bereits bei ihrer Entstehung durch Schmutz, Fremdkörper oder Mikroorganismen verunreinigt. Hier ist eine gründliche und schonende Wundreinigung wichtig für eine effektive Wundheilung. Chronische Hautwunden sind häufig mit Wundsekret, abgestorbenem Gewebe und Biofilmen belegt. Diese Beläge verzögern die Wundheilung und müssen deshalb entfernt werden. Das in MediGel® Wundreinigungsspray enthaltene Tensid fördert die Reinigungsleistung auf der Wundoberfläche sowie den angrenzenden Hautarealen.

MediGel® Wundreinigungsspray dient der effektiven Reinigung von verschmutzten und belegten Wunden.

Die physikalischen Eigenschaften von MediGel® Wundreinigungsspray dienen:

- der Vorbeugung von Infektionen
- der Optimierung des Wundmilieus
- dem schmerzfreien Aufsprühen
- der Kühlung

Hinweise zur Anwendung

MediGel® Wundreinigungsspray kann unmittelbar nach der Verletzung auf die Wunde gesprüht werden. Anschließend sollte MediGel® Wundreinigungsspray mittels handelsüblicher steriler Mullkompressen wischend entfernt werden. Ein Nachspülen ist nicht erforderlich.

Zur Befeuchtung der Wunde handelsübliche Verbände und Wundaufgaben (z. B. Kompressen, Gaze) ausreichend mit MediGel® Wundreinigungsspray befeuchten und ca. 10-15 Minuten auf die Wunde auflegen. Nach der Einweichphase können Verkrustungen und anhaftende Verbände gelöst werden.

MediGel® Wundreinigungsspray ist zum wiederholten und langfristigen Gebrauch geeignet.

Bei sehr großen, stark nässenden oder infizierten Wunden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da unter Umständen eine spezielle Behandlung erforderlich ist. Ab Verbrennungen Grades 2b (Blasenbildung) sollte grundsätzlich ein Arzt hinzugezogen werden.

MediGel® Wundreinigungsspray ist nicht zytotoxisch und nicht sensibilisierend. MediGel® Wundreinigungsspray enthält keine hautreizenden Substanzen.

Vorsichtsmaßnahmen

- MediGel® Wundreinigungsspray ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt und darf nicht eingenommen werden. Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden.
- Es ist auf eine hygienische Entnahme zu achten. Ist die Flasche mit der Wunde in Kontakt gekommen oder anderweitig verunreinigt, ist sie umgehend zu entsorgen.
- Bitte Flasche nach Gebrauch verschließen und Verunreinigungen vermeiden.
- Nur einwandfreie und unbeschädigte Behälter verwenden.
- Schwangerschaft und Stillzeit: Es finden sich bei topischer Anwendung sowie bei Anwendung auf Wunden keine Anhaltspunkte auf mutagene oder embryotoxische Wirkungen der Inhaltsstoffe, jedoch sollte die Anwendung bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kleinkindern nur bei zwingender Indikation nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Wechselwirkungen

Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Nicht verwenden in Kombination mit anionischen Tensiden.

Kontraindikation

Kontakt mit Knorpelgewebe vermeiden.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Apotheker oder dem Hersteller mit.



Anmerkungen:

Größe (offen): 164 x 297 mm

Größe (gefalzt):

Zeichnungsnummer: --

Laetuscode-Nr.: --

Erstellt am: 10.07.24

Art.-Nr.: 403000049506

Art.-Bez.: GI MediGel Wundreinigungsspray

Farben: ■ Schwarz

Hinweis zur Aufbewahrung

- Temperaturbegrenzung beachten.
- Das Produkt vor direktem Sonnenlicht schützen.
- Trocken aufbewahren.
- Gebrauchsanweisung beachten.
- Vor Kindern sicher aufbewahren.
- Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellung.
Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Ablauffrist: 3 Monate nach Anbruch.

Bestandteile

Aqua purificata, Cocamidopropyl Betaine, Trace Elements (Zinc, Iron), Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide).

Packungsgrößen

50 ml

Hersteller

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Deutschland
Telefon: +49 (0) 2371 937-0
Telefax: +49 (0) 2371 937-329
E-Mail: info@medice.de
www.medice.de

Mitvertreiber

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 35, 38259 Salzgitter, Deutschland
Telefon: +49 5341 307-0
Telefax: +49 5341 307-124
E-Mail: info@schaper-bruemmer.de
www.schaper-bruemmer.de

Vertrieb Österreich

MEDICE Arzneimittel GmbH Römerstraße 14
5400 Hallein, Österreich

Stand der Information: Juli 2024

Erläuterung der Symbole auf dem Umkarton



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



Beschädigte Flasche nicht verwenden



Temperaturbegrenzung



Hersteller



Vertriebspartner



Nach Anbruch 3 Monate haltbar



Vor Sonnenlicht schützen



Vor Feuchtigkeit schützen